


# Personal Best®

## Débitmètre de pointe universel

Technologie d'échantillonnage du débit brevetée qui minimise l'usure... maximise la précision et la reproductibilité

Prise en charge de l'asthme à trois zones... facilitée

Construction en plastique ABS à résistance élevée aux chocs, pièces mobiles en acier inoxydable de qualité chirurgicale – pour des performances fiables

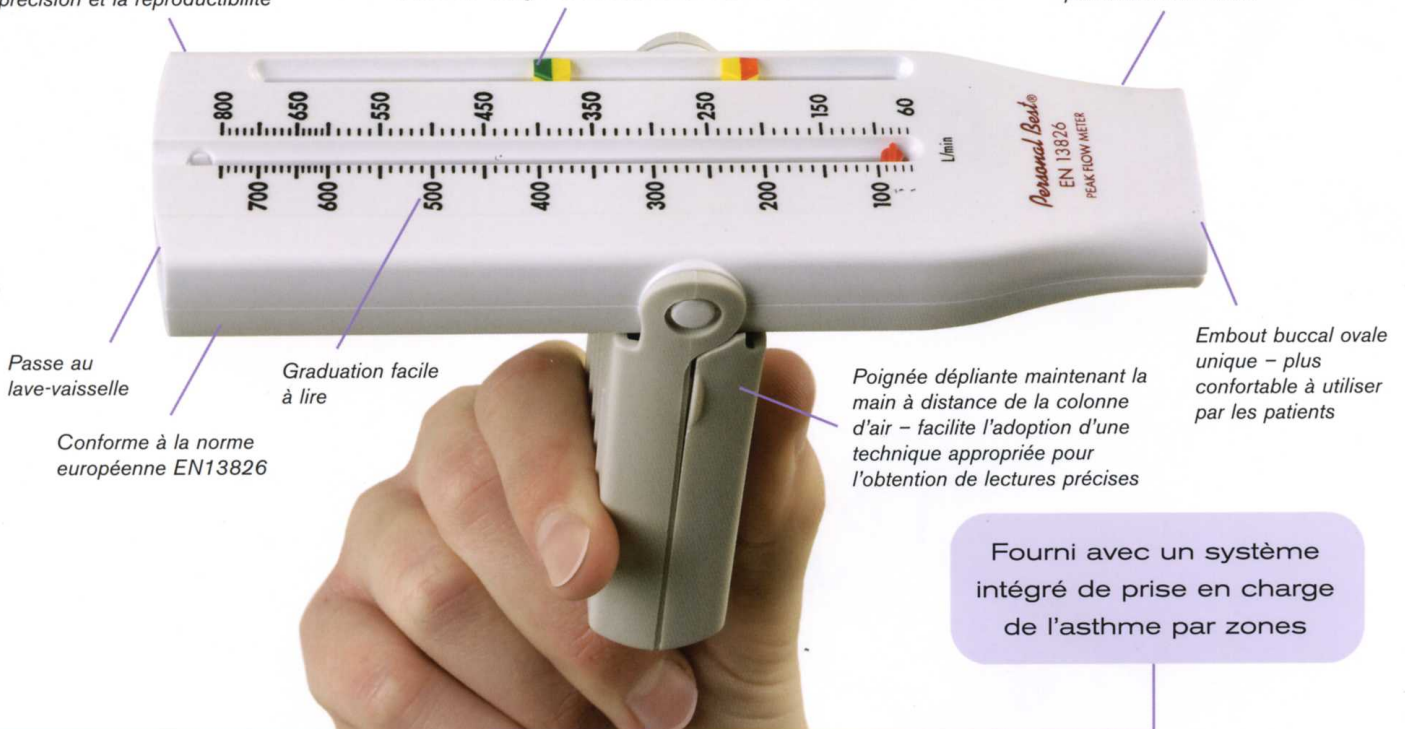

Passe au lave-vaisselle

Conforme à la norme européenne EN13826

Graduation facile à lire

Poignée dépliant maintenant la main à distance de la colonne d'air – facilite l'adoption d'une technique appropriée pour l'obtention de lectures précises

Embout buccal ovale unique – plus confortable à utiliser par les patients

Fourni avec un système intégré de prise en charge de l'asthme par zones

### Caractéristiques techniques du produit

Conforme à la norme européenne EN13826

#### Données sur les performances

Normes Personal Best	(La valeur la plus élevée étant retenue)
Précision	+/- 10% ou 10 L/mn
Reproductibilité	≤ 5% ou 10 L/mn
Linéarité	≤ 5% ou 10 L/mn
Résistance à l'écoulement	≤ 0.35 kPa/L/S
Réponse en fréquence	≤ 12% ou 15 L/mn
Précision du débit	10 L/mn de 60 à 700 L/mn 20 L/mn de 700 à 800 L/mn

#### Matériaux

Corps principal	Plastique ABS à résistance élevée aux chocs
Couvercle et poignée	Polypropylène haute densité
Graduation	Estampée à chaud, résistante à l'alcool

#### Données sur l'étalonnage

Plage de mesure	60 – 800 L/mn
Résolution	10 L/mn

#### Nettoyage

Le dispositif Personal Best® peut être lavé dans de l'eau savonneuse chaude ou placé dans le bac supérieur d'un lave-vaisselle et séché à l'air libre. Ne jamais le faire bouillir ou le mettre dans un autoclave.

### Données sur la durée de vie

La précision et la reproductibilité sont garanties pendant un an.

### Prise en charge de l'asthme à trois zones

Le système de prise en charge de l'asthme à trois zones permet aux patients de respecter les schémas posologiques. Les voyants codés en couleur (situés sur la droite de la graduation) peuvent être ajustés pour définir les zones vertes, jaunes et rouges d'un patient en se basant sur leur meilleur débit de pointe personnel.

### Informations de commande

No. de référence	Description du produit
1022973	Personal Best EU



Distribué par Teleflex Medical sa, 31460 Le Faget, France

Tel: 05 62 18 79 40

Fax: 05 61 83 35 8


[www.teleflexmedical.com](http://www.teleflexmedical.com)

**Teleflex**  
MEDICAL


Respironics Deutschland, Gewerbestrasse 17, 82211 Herrsching, Germany  
[www.respironics.com](http://www.respironics.com)

© 2005 Respironics, Inc. et ses filiales. Tous droits réservés.


1027367 REV1

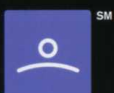

SLEEP  
MANAGEMENT

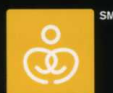


CHRONIC RESPIRATORY  
MANAGEMENT

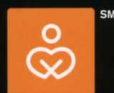

TOTAL VENTILATION  
SOLUTIONS



RESPIRATORY  
DRUG DELIVERY

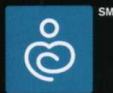

NEONATAL &  
INFANT CARE