

# Utilisation du Kit de nébulisation avec avec le compresseur AC 2000

Système générateur d'aérosol pour la délivrance d'un traitement à visée broncho-pulmonaire.


Transforme une solution ou une suspension en un brouillard de fines gouttelettes (aérosol)

## **UTILISATION :**

- 1) Lavez vous les mains.
- 2) Versez le médicament dans la cuve du nébuliseur conformément à votre prescription.
- 3) Reliez le nébuliseur au compresseur avec le tuyau souple.
- 4) Adaptez le masque ou l'embout buccal sur le nébuliseur.
- 5) Mettez en marche le compresseur et respirez l'aérosol par la bouche.
- 6) Arrêtez le traitement lorsqu' aucun brouillard ne sort plus du masque (un peu de médicament peut rester dans le nébuliseur, c'est le volume résiduel)

## **Caractéristiques techniques (norme NF EN 13544-1) avec compresseur AC 2000 :**

Débit d'Aérosol produit à 8L/Min : 0.07 ml/min .  
Aérosol produit : 0.49 ml  
MMAD : 2,83  $\mu\text{m}$ .  
(pour 2.5 ml dans le nébuliseur)  
Pression d'utilisation : 138 Kpa  
Niveau sonore : 59 dbA  
Volume de remplissage : 2-10 ml . (mini-maxi)

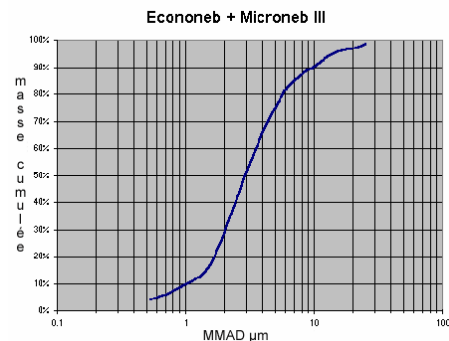

**NETTOYAGE :** doit être nettoyé après chaque utilisation.

1. Immédiatement après usage, démonter le nébuliseur et jeter le médicament restant.
2. Nettoyer les éléments du nébuliseur dans de l'eau chaude avec un peu de liquide vaisselle.
3. Rincer soigneusement et laisser sécher complètement avant de remonter le nébuliseur.
4. Faire fonctionner à vide quelques secondes , et stocker dans un endroit propre et sec, recouvert d'un linge propre.

**PATIENT UNIQUE**

**SANS LATEX**

MEDIFLUX 15 bis rue de la République  
94360 BRY SUR MARNE  
**WWW.MEDIFLUX.FR**