

PENFINE UNIVERSAL CLICK (Ypsomed ex Disetronic)		BD MICRO-FINE + (BD Consumer Healthcare)	
6 mm	772 682 3	5 mm	739 598 7
8 mm	772 684 6	8 mm	710 380 3
10 mm	772 685 2	12,7 mm	662 603 1
12 mm	772 686 9		

Aiguilles compatibles avec les cartouches pour OptiClik®

Les 7 règles d'or OptiClik®

... pour le bon usage de votre stylo

1. Ne jamais conserver OptiClik® au réfrigérateur.
2. Seules les aiguilles BD MICROFINE + et Ypsomed PENFINE UNIVERSAL CLICK sont compatibles.
3. Toujours fixer l'aiguille bien droite et bien centrée sur la membrane à l'extrémité de la cartouche. Une fixation incorrecte peut entraîner la cassure de l'aiguille ou provoquer une fuite d'insuline ayant pour conséquence un mauvais dosage.
4. Mettre une nouvelle aiguille stérile avant chaque injection. Ne pas conserver OptiClik® avec une aiguille fixée dessus. En laissant l'aiguille en place entre deux injections, des bulles d'air peuvent se former à l'intérieur de la cartouche. De plus, l'insuline risque de cristalliser à l'intérieur de l'aiguille et de la boucher, ce qui pourrait entraîner des fuites à l'injection suivante.
5. Toujours pratiquer un test de sécurité avant chaque injection. Ce test permet de vous assurer du bon fonctionnement de votre stylo et de l'aiguille.
6. Ne jamais forcer pour mettre une cartouche en place dans le corps du stylo. Vous risquez d'endommager définitivement votre stylo.
7. Toujours remettre le capuchon protecteur du stylo sur le corps du stylo après utilisation. Ce geste vous permet de prolonger la durée de vie de votre stylo et de protéger l'insuline contenue dans la cartouche de toute exposition prolongée à la lumière.

Service stylos injecteurs d'insulines sanofi-aventis
N° Vert 0 800 10 52 53
 Appell gratuit depuis un poste fixe
 Disponible 24 h / 24, 7 j / 7

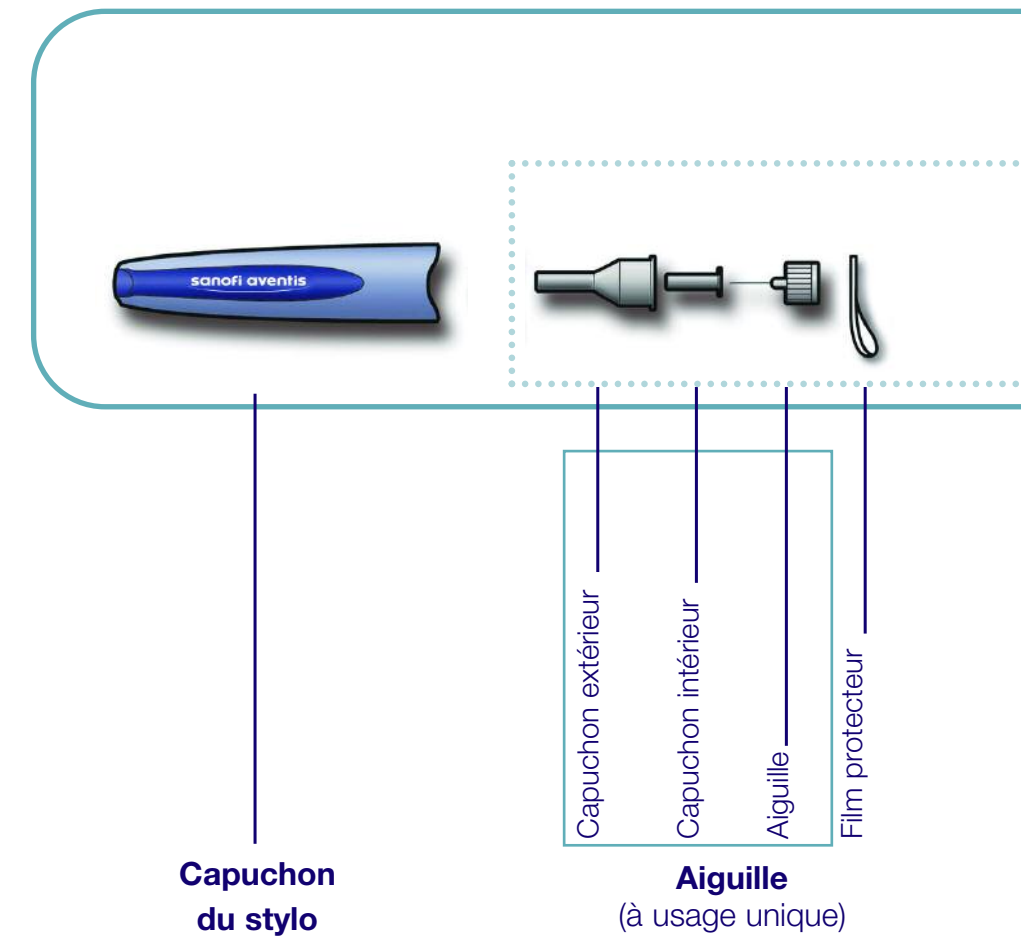
★ EURO RSCG LIFE - 21.456600 - novembre 2005

Manuel simplifié d'utilisation*

OptiClik®

Stylo injecteur d'insuline réutilisable

sanofi aventis
L'essentiel c'est la santé.




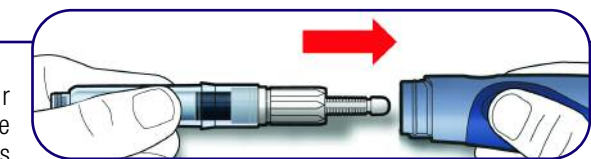
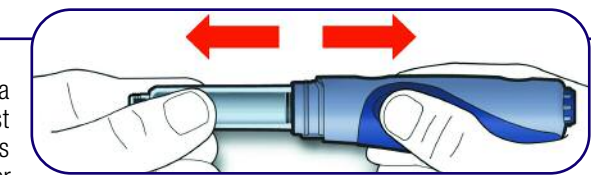
Avant d'utiliser OptiClik® vous devez avoir été formé sur l'utilisation du stylo par votre professionnel de santé ou une personne compétente

* Avant la première injection, en cas de panne ou de questions précises, veuillez lire l'information complète figurant sur la notice de la boîte du stylo

Votre OptiClik® en 7 étapes

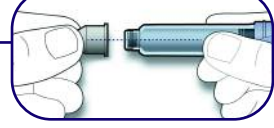

Etape 1

Insertion de la cartouche pour OptiClik®

- a** Vérifier que le bouton de dosage est enfoncé. 
- b** Insérer la cartouche pour OptiClik® de façon bien droite dans le corps du stylo. Si vous rencontrez une résistance, relever légèrement la cartouche pour OptiClik® et la tourner pendant que vous l'insérez. Assurez-vous qu'elle est bien assemblée : vous devez entendre un "clic". Ne pas forcer. 
- c** Afin de vous assurer que la cartouche pour OptiClik® est correctement insérée, après avoir entendu le déclic, essayer de la retirer délicatement. La cartouche pour OptiClik® doit rester en place. 

Etape 2

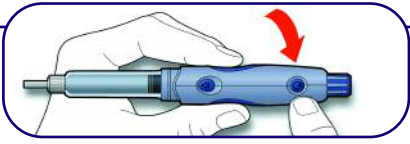

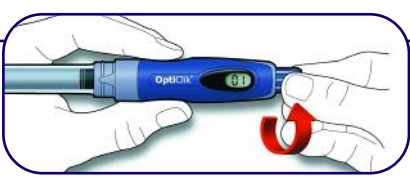
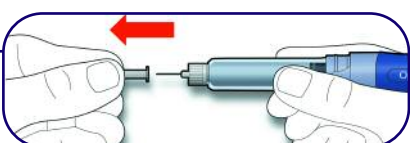
Fixation de l'aiguille

- a** Fixer une nouvelle aiguille stérile sur la cartouche pour OptiClik®, de façon bien droite et bien centrée. 


Etape 3

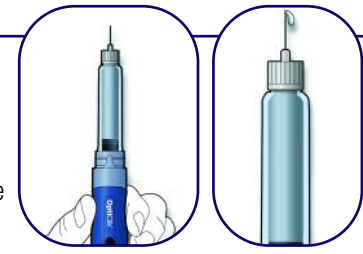
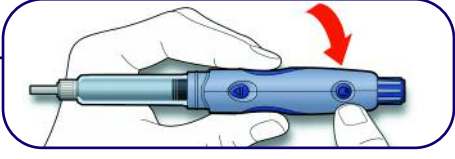

Test de sécurité

Avant chaque injection, effectuer un test de sécurité pour ne pas risquer de vous injecter trop ou pas assez d'insuline. Assurez-vous que vous avez fixé une aiguille sur OptiClik® avant de procéder au test de sécurité.

- a** Appuyer sur le bouton de mise en marche. Le bouton de dosage se débloque et ressort. 
- b** Les chiffres "00" apparaissent au niveau de l'écran d'affichage numérique de la dose. 
- c** Tourner le bouton de dosage vers la droite (dans le sens des aiguilles d'une montre) jusqu'au déclic. "01" apparaît sur l'écran d'affichage numérique de la dose. 
- d** Retirer le capuchon intérieur de l'aiguille. Manipuler l'aiguille nue avec précaution. 



Etape 4

Réglage de la dose

- a** Tenir OptiClik® avec l'aiguille pointée vers le haut. Appuyer sur le bouton de dosage jusqu'à ce qu'il se bloque en position enfoncée. De l'insuline doit apparaître à l'extrémité de l'aiguille. Dans le cas contraire, répéter le test de sécurité. Si vous utilisez une nouvelle cartouche pour OptiClik®, il peut être nécessaire de répéter ce test plusieurs fois. 
- a** Appuyer sur le bouton de mise en marche. 
- b** Tourner lentement le bouton de dosage vers la droite (dans le sens des aiguilles d'une montre) jusqu'à la dose souhaitée. Assurez-vous que le bouton de dosage ne se trouve pas entre deux unités de dose. Vous devez sentir et entendre un déclic. Si vous avez sélectionné une dose trop élevée, tourner simplement le bouton de dosage dans le sens inverse (vers la gauche). 

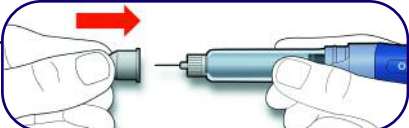

Etape 5

Injection de la dose

- a** Insérer l'aiguille selon la méthode recommandée par votre professionnel de santé. 
- b** Appuyer lentement mais complètement sur le bouton de dosage. Avant de retirer l'aiguille, compter lentement jusqu'à 10 tout en maintenant le bouton enfoncé. Le bouton de dosage doit rester enfoncé après l'injection. Si le bouton de dosage reste enfoncé, cela signifie que vous vous êtes bien injecté la totalité de la dose. 

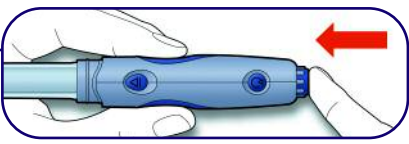
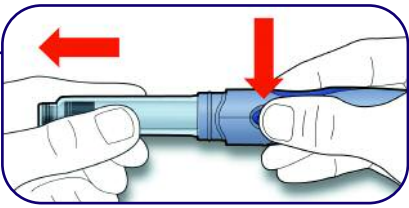
Etape 6

Retrait de l'aiguille

- a** Remettre avec précaution le capuchon extérieur de l'aiguille. 
- b** Retirer l'aiguille après l'injection. Toujours remettre le capuchon protecteur du stylo sur le corps du stylo après utilisation 

Etape 7

Remplacement d'une cartouche pour OptiClik® vide

- a** Vérifier que le bouton de dosage est enfoncé 
- b** Appuyer sur le bouton de libération de la cartouche et retirer la cartouche pour OptiClik®. 

Recommencer à partir de l'étape 1.