

NOUVEAU

ONETOUCH<sup>®</sup>  
Ultra<sup>2</sup>

Mode d'emploi simplifié



 **LIFESCAN**  
a Johnson & Johnson company

Lors de la 1<sup>ère</sup> utilisation du lecteur de glycémie, il vous sera demandé de contrôler et d'actualiser les pré-réglages. Pour plus d'informations, consulter la rubrique **RÉGLAGES** (étapes ② à ⑦) située au verso.

## RÉALISER UN TEST

①

Prendre une bandelette dans le flacon (vous pouvez toucher la bandelette sur toute sa surface).





Insérer la bandelette : barres de contact dans le lecteur de glycémie (celui-ci se met en marche automatiquement).



Faire correspondre les codes\* (flacon et lecteur) à l'aide des boutons ▼ ▲ , puis valider avec **OK** .

\* Lors de la 1<sup>ère</sup> utilisation le symbole « -- » s'affiche sur l'écran, cela signifie qu'aucun code n'est enregistré.



Mettre en contact l'extrémité de la bandelette avec la goutte de sang (la bandelette aspire instantanément 1  $\mu$ l de sang).



Le résultat s'affiche en 5 secondes et est automatiquement stocké en mémoire (capacité de 500 résultats).

⑥



Retirer la bandelette usagée,  
le lecteur s'éteint.




OK

Bouton  
de validation et  
de rétroéclairage\*

Bouton de  
défilement  
vers le haut



Bouton de  
défilement  
vers le bas

\* A tout moment, vous pouvez rétroéclairer l'écran en maintenant le bouton  appuyé.

# CONSULTER LES MÉMOIRES

Maintenir le bouton  appuyé pour allumer le lecteur



Dans l'écran MENU PRINCIPAL, sélectionner à l'aide des boutons   l'option de votre choix :

- DERNIER RÉSULTAT
- TOUS LES RÉSULTATS
- MOYENNE DES RÉSULTATS

et valider avec  .

**Pour tout renseignement contacter  
LifeScan Services\* au :**




**▶ N° Vert 0 800 459 459**  
APPEL GRATUIT

**7 jours/7, 24 heures/24**  
[www.LifeScan.fr](http://www.LifeScan.fr)



\* Appel gratuit depuis un poste fixe. Conformément à la loi informatique et liberté n° 2004-801 du 06 août 2004 Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données personnelles et modifiant la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés. Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données personnelles qui vous concernent auprès de LifeScan « a Johnson & Johnson company » - 1, rue Camille Desmoulins - TSA 40007 - 92787 Issy-Les-Moulineaux cedex 9.

## ① RÉGLAGES DU LECTEUR

Maintenir le bouton  appuyé pour allumer le lecteur.




Dans l'écran MENU PRINCIPAL, à l'aide des boutons  ,




- sélectionner **RÉGLAGE** et valider avec ,
- puis sélectionner **RÉGLAGES LECTEUR** et valider avec .

## ② LANGUE




Dans l'écran LANGUE à l'aide des boutons  , sélectionner la langue de votre choix et valider avec .

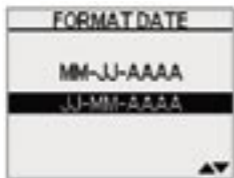

### ③ FORMAT



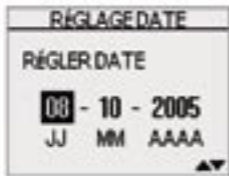


Dans l'écran **FORMAT DATE** à l'aide des boutons   , sélectionner le format date (mois ou jour en 1<sup>ère</sup> valeur) et valider avec  .


### ④ DATE






Dans l'écran **RÉGLAGE DATE** appuyer sur   pour changer

- la 1<sup>ère</sup> valeur et valider avec  .
- la 2<sup>ème</sup> valeur et valider avec  .
- l'année et valider avec  .

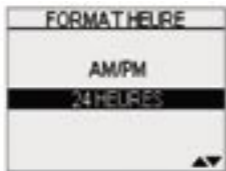

## ⑤ HEURE





Dans l'écran  
FORMAT HEURE  
à l'aide des  
boutons  ,  
sélectionner le  
format d'heure  
(AM/PM ou 24h)  
et valider avec  .

## ⑥




Dans l'écran  
REGLAGE HEURE,  
appuyer sur    
pour :

- régler l'heure et  
valider avec  .
- régler les minutes  
et valider avec  .

## ⑦ VALIDATION DES RÉGLAGES


Dans l'écran RÉGLAGES à l'aide des boutons ▼ ▲, sélectionner :



- OUI pour valider les réglages.
- NON pour modifier les réglages et valider avec .

## ⑧ ÉTEINDRE LE LECTEUR



Dans l'écran MENU PRINCIPAL à l'aide des boutons ▼ ▲, sélectionner LECTEUR ÉTEINT et valider avec .




## ACTIVER LA FONCTION INFO/REMARQUES

Le lecteur de glycémie  
*ONETOUCH<sup>®</sup> Ultra<sup>2</sup>*, vous offre la  
possibilité d'associer à un résultat  
de test une information REPAS et/ou  
REMARQUE (immédiatement après  
le test ou lors de la consultation des  
résultats en mémoire).



## ① REGLAGE INFO/REMARQUES



Dans l'écran  
RÉGLAGE  
à l'aide des  
boutons  ,  
sélectionner INFO/  
REMARQUES et  
valider avec  .

②





A l'aide des  
boutons  ,  
sélectionner OUI\*  
pour activer cette  
fonction et valider  
avec  .


\* Si la fonction est déjà activée, sélectionner NON.



## ③ AJOUTER UNE INFORMATION REPAS ET/OU DES REMARQUES\*

Lorsque le résultat est affiché (immédiatement après le test ou lors de la consultation des résultats en mémoire) appuyer sur le bouton :

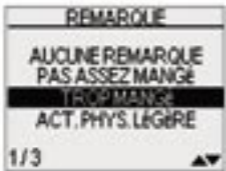

 pour accéder à l'écran INFO/REPAS. Sélectionner une information repas et valider avec .



 pour accéder à l'écran REMARQUE. Sélectionner une remarque et valider avec .

\* Fonction INFO/REMARQUE activée

## ④ RÉSULTAT RENSEIGNÉ\*



L'information repas et la remarque choisies apparaissent respectivement au-dessus et en-dessous du résultat.

\*Fonction INFO/REMARQUE activée