

MESURE DE LA GLYCEMIE



A chaque nouvelle boîte de bandelettes Accu-Chek Performa, insérez la nouvelle puce de calibration.



- 1 Insérez la bandelette,** le lecteur s'allume automatiquement.



- 2 Vérifiez que le code** affiché à l'écran correspond au code du flacon de bandelettes.



Le symbole ci-contre clignote à l'écran. **Prélevez une petite goutte de sang.**



- 3 Appliquez la goutte de sang** à l'extrémité de la bandelette.




Lorsque la quantité de sang est suffisante, vous entendrez un « bip », un sablier apparaît à l'écran.



Résultat en 5 secondes

- 4 Différents marquages existent afin d'identifier votre glycémie :**

Appuyez et relâchez la touche  pour passer d'un marquage de résultat à un autre.



- Marquage avant repas



- Marquage avant repas avec rappel après repas



- Marquage après repas



- Marquage général (autres événements)

Retirez la bandelette, le lecteur s'éteint automatiquement après quelques secondes.

PRÉLÈVEMENT CAPILLAIRE

1^{er}
autopiqueur
à barillet
avec 6 lancettes
intégrées

ACCU-CHEK® Multiclix



Enlevez l'embout de l'autopiqueur. Insérez un barillet neuf et replacez l'embout.



Lorsque la fenêtre de visualisation n'indique plus de barre blanche, enlevez l'embout et retirez le barillet usagé. Insérez ensuite un nouveau barillet.

PRÉLÈVEMENT SUR SITES ALTERNATIFS

L'autopiqueur Accu-Chek Multiclix à l'aide de son embase transparente ainsi que le lecteur Accu-Chek Performa Nano permettent un prélèvement sanguin sur sites alternatifs. (Base du pouce ou de l'auriculaire, bras, avant-bras, cuisse ou mollet)

Respectez bien les recommandations de votre médecin.



Assistance utilisateurs
N° Vert 0 800 27 26 93
appel gratuit à partir d'un poste fixe

ACCU-CHEK®



ACCU-CHEK® Performa Nano



Quand la performance rencontre le design.

Mode d'emploi simplifié

www.accu-chek.fr
www.MyNano.fr

ACCU-CHEK®

ACCU-CHEK® Performa Nano, ACCU-CHEK® Multiclix sont des marques du Groupe Roche. © 2008 Roche Diagnostics
 3326 - PROG 04 76 41 31 31 - Réf: 56402275 - 02/2009

PREMIÈRE UTILISATION



- 1 Insérez la puce de calibration qui se trouve dans la boîte de bandelettes.



- 2 Allumez le lecteur en appuyant sur .



- 3 Le lecteur est pré-réglé. Appuyer 5 fois sur pour valider les paramètres (heure, minutes, jour, mois, année).
Il est possible de les modifier en appuyant sur ou .

Lorsque la bandelette clignotante apparaît à l'écran , vous pouvez :

- Eteindre le lecteur en appuyant sur ou bien
- Insérer une bandelette dans le lecteur et mesurer votre glycémie.

RÉGLAGES : POUR ALLER PLUS LOIN

Paramètres à régler :

heure, minutes, jour, mois, année, signal sonore, sonneries de rappel (Rappel des glycémies post prandiales (1h ou 2h après le repas), jusqu'à 4 sonneries programmables), alerte de risque d'hypoglycémie (50 à 90 mg/dl).



- 1 Pour accéder au mode réglage, appuyez sur la touche . Le lecteur se met en marche.



- 2 Appuyez longuement sur la touche jusqu'à ce que le menu réglage « set-up » s'affiche. Les paramètres « heure » et « date » apparaissent.



- 3 Pour modifier la valeur d'un paramètre, appuyez sur ou . Pour passer au paramètre suivant, appuyez sur .

Vous pouvez quitter le menu réglage à tout moment en appuyant longuement sur la touche . Le symbole de la bandelette clignote .

Vous pouvez alors insérer une bandelette pour réaliser une glycémie, ou bien éteindre le lecteur en appuyant sur la touche .

MÉMOIRES ET MOYENNES



1 MÉMOIRES

Lecteur éteint, appuyez sur la touche ou pour accéder à la mémoire. Le résultat le plus récent apparaît.

Appuyez sur la touche pour afficher les résultats précédents puis sur la touche pour revenir aux résultats les plus récents.

Appuyez sur la touche pour éteindre le lecteur.



2 MOYENNES

Lecteur éteint, appuyez sur la touche ou pour accéder à la mémoire. Le résultat le plus récent apparaît.


Appuyez sur la touche pour avoir les moyennes sur les 7, puis sur les 14, 30 ou 90 derniers jours.

En continuant d'appuyer sur , vous avez ensuite : les moyennes pré-prandiales sur 7, 14, 30 et 90 jours puis les moyennes post-prandiales sur 7, 14, 30 ou 90 jours. Appuyez sur la touche pour éteindre le lecteur.



CONNEXION INFORMATIQUE

Lecteur éteint, restez appuyé simultanément sur les touches et jusqu'à ce que le voyant ci-dessous apparaisse en clignotant :

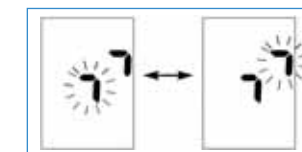

Vous pouvez maintenant transférer par infrarouge vos données à un ordinateur ou à un ordinateur de poche (requiert un logiciel de la gamme Accu-Chek).