



COMMENT EFFECTUER UN TEST DE GLYCÉMIE EN SEULEMENT 4 ÉTAPES?



1. Insérer la bandelette réactive, le lecteur se met en marche automatiquement.



2. Après prélèvement d'une petite goutte de sang, mettre en contact avec l'extrémité de la bandelette (aspiration instantanée par capillarité).



3. Le résultat s'affiche en 5 secondes seulement. Il est automatiquement stocké en mémoire.



4. Retirer la bandelette usagée, le lecteur s'éteint.

Pour vous aider
à mieux vivre votre
diabète au quotidien

ONETOUCH®
SERVICES

www.LifeScan.fr

24h/24 ■ 7j/7

N° Vert 0 800 459 459


APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE



Ortho Healthworld

Les fonctions complémentaires du lecteur ONETOUCH® VITA™




Après affichage du résultat, si la glycémie a été réalisée après repas, appuyer sur  puis retirer la bandelette.



Pour consulter la mémoire, lecteur éteint, appuyer sur **OK**.

Avec les flèches, sélectionner :

- « **Dernier résultat** » ,
- « **Tous les résultats** »
- ou « **Moyennes** ».

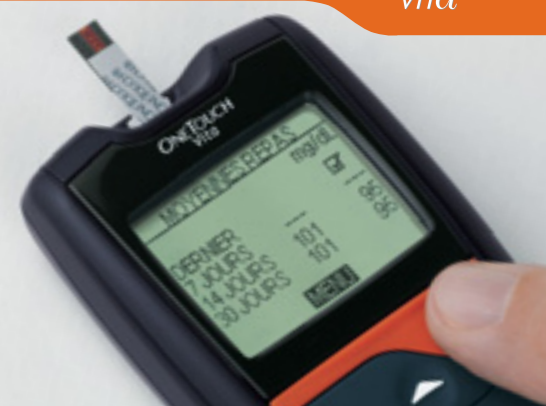

Sélectionner « **Moyennes** » et valider par **OK**. Vous avez le choix entre « **Moyennes tous résultats** » et « **Moyennes repas** » (moyennes des glycémies après repas que vous avez identifiées) sur les 7, 14 et 30 derniers jours.

ONETOUCH®
VITA™

ONETOUCH®
VITA™



LifeScan SAS, division de la société Ortho-Clinical Diagnostics France, société par actions simplifiée au capital social de 1 112 064 € immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°B330202334, dont le siège social se situe au 1, rue Camille Desmoulins TSA 40007 92787 Issy-les-Moulineaux Cedex 09.