


NOUVEAU

ACCU-CHEK® Go

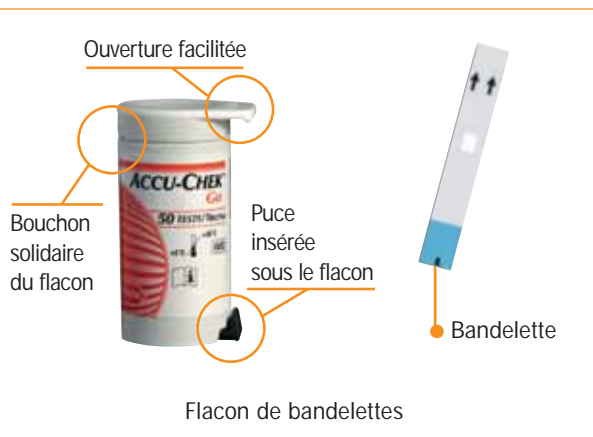


Attention !
Première utilisation : retirer le compartiment de la pile et enlever la feuille de protection

accucommunication Réf. 0004020 8265 - 05/2006

Mesure de la glycémie

■ A chaque ouverture d'un flacon de bandelettes, insérer la puce de calibration dans le lecteur.

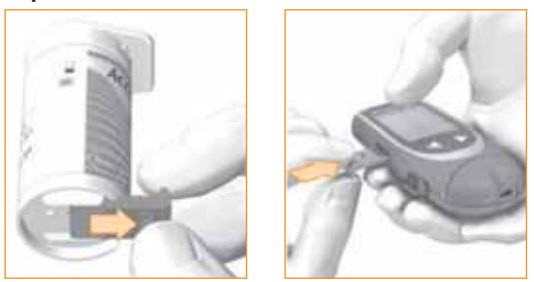

■ Le lecteur se met en marche automatiquement par simple insertion de la bandelette Accu-Chek Go (dans le sens des flèches, flèches sur le dessus, tournées vers le haut et jusqu'au déclic).




■ Vérifier que le code qui s'affiche sur l'écran correspond à celui indiqué sur le flacon de bandelettes. S'il est différent, ou si aucun code ne s'affiche, insérer la puce de calibration correspondant au flacon de bandelettes en cours d'utilisation.



■ Le symbole d'une goutte clignote

Se piquer le doigt pour obtenir une petite goutte de sang.

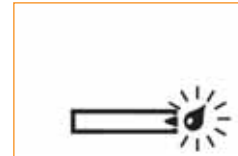


■ Aspiration de la goutte

Approcher la goutte de sang du bout de la bandelette au niveau de l'encoche noire. Maintenir ce contact jusqu'au bip. Le résultat s'affiche en 5 secondes.



■ Ejection de la bandelette

Pousser le bouton d'éjection de la bandelette vers le bas, en ayant soin de tenir le lecteur à la verticale.

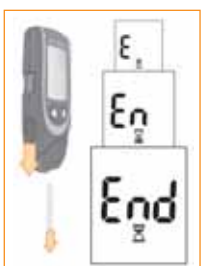

Prélèvement sur sites alternatifs

(base du pouce et de l'auriculaire, bras, avant-bras, cuisse ou mollet)

■ Appliquer fermement l'embase transparente sur votre peau à l'endroit où la ponction doit être effectuée.

Appuyer ensuite sur le bouton de déclenchement et maintenir l'autopiqueur ainsi plaqué contre votre peau durant quelques secondes.



Les taux de glycémie mesurés à partir du sang prélevé sur sites alternatifs peuvent différer des résultats obtenus à partir du sang de la pulpe du doigt. C'est pourquoi il est déconseillé de faire un prélèvement sur sites alternatifs dans les cas suivants :

- moins de 2 heures après un repas,
- après un exercice physique,
- si vous êtes malade,
- si vous suspectez une hypoglycémie ou si vous percevez mal vos hypoglycémies,
- pendant le pic d'action de l'insuline basale,
- moins de 2 heures après une injection d'insuline rapide.



ACCU-CHEK® Go
Bien mesurer
pour mieux décider

NOUVEAU




ACCU-CHEK et ACCU-CHEK Go sont des marques du Groupe Roche. ©2003 Roche Diagnostics www.accu-chek.fr

ACCU-CHEK®
Vivre sa vie. C'est essentiel.

Réglages de votre lecteur

Le **Set-up rapide** vous permet de sélectionner les réglages que vous souhaitez modifier.

Manipulations valables pour tous les réglages

pour allumer le lecteur : appuyer sur le bouton jusqu'à ce que  apparaisse à l'écran

pour valider les réglages

pour éteindre

  choisir et effectuer les réglages

Date et heure

- format de l'heure
- réglage de l'heure
- heure / minutes
- réglage de la date
- année / mois / jour

à l'aide des boutons de navigation

Utile pour visualiser vos moyennes sur les 7, 14 et 30 derniers jours.

Signal sonore

on 1 = signal sonore enclenché

on 2 = mode audio

off = pas de signal sonore

En mode audio, le lecteur émet des bips guidant pas à pas l'utilisateur dans l'exécution de la mesure de glycémie.

Objectif glycémique

- limite inférieure (LL)

on = modification de la valeur limite à l'aide des boutons de navigation

off = pas de modification

- limite supérieure (LH)

modification de la valeur suivant le même schéma


Permet d'être vigilant face aux risques d'hypo et d'hyperglycémie.

Sonneries de rappel jusqu'à 4 sonneries programmables et optionnelles

Réglage de la première alarme :

AL 1 apparaît

on = pour enregistrer la première alarme

voir  pour régler l'heure

AL 2 apparaît

Pour régler une autre alarme

AL 2 **AL 3** **AL 4**



suivre le même schéma

off = le lecteur s'éteint.


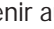
Pratique pour ne pas oublier de faire une glycémie post-prandiale.

Mémoires et statistiques



Mémoires

Lecteur éteint, appuyer brièvement sur une des touches  ou  :


Le lecteur s'allume sur le dernier résultat enregistré.

Pour consulter les résultats précédents, appuyer sur  et revenir aux résultats les plus récents en appuyant sur .

Statistiques

Lecteur éteint, appuyer brièvement sur une des touches  ou  :

Le lecteur s'allume sur le dernier résultat enregistré.

Pour consulter la moyenne des 7 derniers jours, appuyer sur .

Les moyennes des 14 et 30 derniers jours défilent en appuyant sur .

