

NOTICE TECHNIQUE

Sujet : Mode Multi patients

Produit : PiKo

Utilisation en mode multi patients du spiromètre expiratoire PiKo de Ferraris

Bien que conçu pour un usage par un patient unique, le PiKo peut être adapté pour une utilisation multi patients.

Cette adaptation requière l'usage d'embouts jetables. Ces embouts jetables à usage unique, sont des valves en carton unidirectionnelles.

L'utilisation du PiKo en mode multi patients doit respecter les consignes suivantes :

1. Changer l'embout carton entre chaque patient,
2. Aucun contact buccal avec une quelconque partie de l'appareil,
3. L'inspiration doit se faire en dehors de l'appareil.

La plupart des fabricants d'appareils expiratoires ont adopté ce système de valves unidirectionnelles, dont il existe plusieurs types sur le marché, mais seules les valves validées et vendues par Ferraris peuvent être utilisées en toute sécurité.

Ces valves ont fait l'objet de validations, prenant en compte l'impossibilité effective d'une inspiration préalable, (sur les instructions de nos consultants microbiologistes) et l'absence de conséquence sur la précision de la mesure.

Le PiKo doit être nettoyé mais pas totalement désinfecté, et malgré l'efficacité des mesures de prévention qui sont employées contre la contamination par le contact buccal et l'inspiration, le PiKo doit être considéré comme souillé, utilisé en mode multi patients et les précautions d'usage doivent être respectées telles que le lavage des mains après usage.

Dès la première utilisation en mode multi patients, Le PiKo ne peut être utilisé qu'avec les valves unidirectionnelles.