

Cher Utilisateur de RüschtCare,

Veillez lire le mode d'emploi attentivement et observer les illustrations pour une meilleure compréhension.

FLOCATH introGel est un cathéter stérile et flexible, en PVC pour l'autocathétérisation intermittente. Le cathéter est fourni dans une poche servant à collecter l'urine et contient en même temps un gel lubrifiant.

INDICATION Autocathétérisation intermittente (p. ex. en cas de troubles de la vessie neurogènes).

CONTRE-INDICATION Aucune connue.

PROPRIÉTÉS PARTICULIÈRES

FLOCATH introGel possède une aide d'introduction (Introducer) en silicone, agréable à la peau. L'aide d'introduction sert à l'introduction simple du cathéter dans l'urètre. Par ailleurs, le transport d'agents pathogènes par le cathéter est réduit, étant donné que celui-ci n'entre pas en contact direct avec l'orifice de l'urètre. Une poche collectrice d'urine est en outre intégrée au système.

LIVRAISON / STOCKAGE Chaque cathéter est fourni dans un emballage "Peel-back" stérile en tant qu'une unité de 30 pièces. La stérilité est garantie aussi longtemps que l'emballage est intact. Le cathéter est destiné à l'usage unique. Stockage dans l'emballage original. Protéger contre la lumière et la chaleur.

CONTRE-INDICATIONS Aucune connue.

SUPPLÉMENT NÉCESSAIRE

- Savon neutre.

FABRICANT Rüscht • Kamunting Industrial Estate
34600 Kamunting • Perak • Malaysia

REPRÉSENTANT EUROPÉEN Rüscht GmbH
Willy-Rüscht-Straße 4-10 • 71394 Kernen i.R. • Germany

CE 0124 Stérile, destiné à l'usage unique.
Méthode de stérilisation : voir l'étiquette du produit.

Autosondage intermittent

- D'abord se laver les mains, ensuite la région anale et génitale et sécher.
On recommande l'utilisation d'un antiseptique pour la désinfection de l'orifice de l'urètre et de la région avoisinante.
- Ouvrez l'emballage et prélevez le FLOCATH introGel.
- Enlevez le capuchon en plastique de l'aide d'introduction (Introducer) par légère rotation.
- Enfoncez la pointe du cathéter dans l'aide d'introduction afin de stabiliser la pointe en silicone molle.
- Cathétérisation : Utilisez l'aide d'introduction (Introducer) pour ouvrir l'urètre et effectuez la cathétérisation selon les instructions du médecin.
- Après avoir vidé la vessie et terminé la cathétérisation, vous avez 2 possibilités :
a. Elimination du système rempli
b. Elimination du système vidé. Pour ce faire, déchirer la poche à l'endroit marqué et la vider.

