


COMMENT utiliser le stylo FLEXPEN

Introduction FlexPen® est un stylo injecteur d'insuline unique. Il vous permet de sélectionner des doses d'insuline comprises entre 1 et 60 unités par palier de 1 unité. FlexPen® est spécialement conçu pour être utilisé avec les aiguilles NovoFine® S d'une longueur maximale de 8 mm. Vérifiez toujours qu'un **S** figure sur la boîte des aiguilles. Le **S** indique qu'il s'agit d'aiguilles munies d'une protection courte.


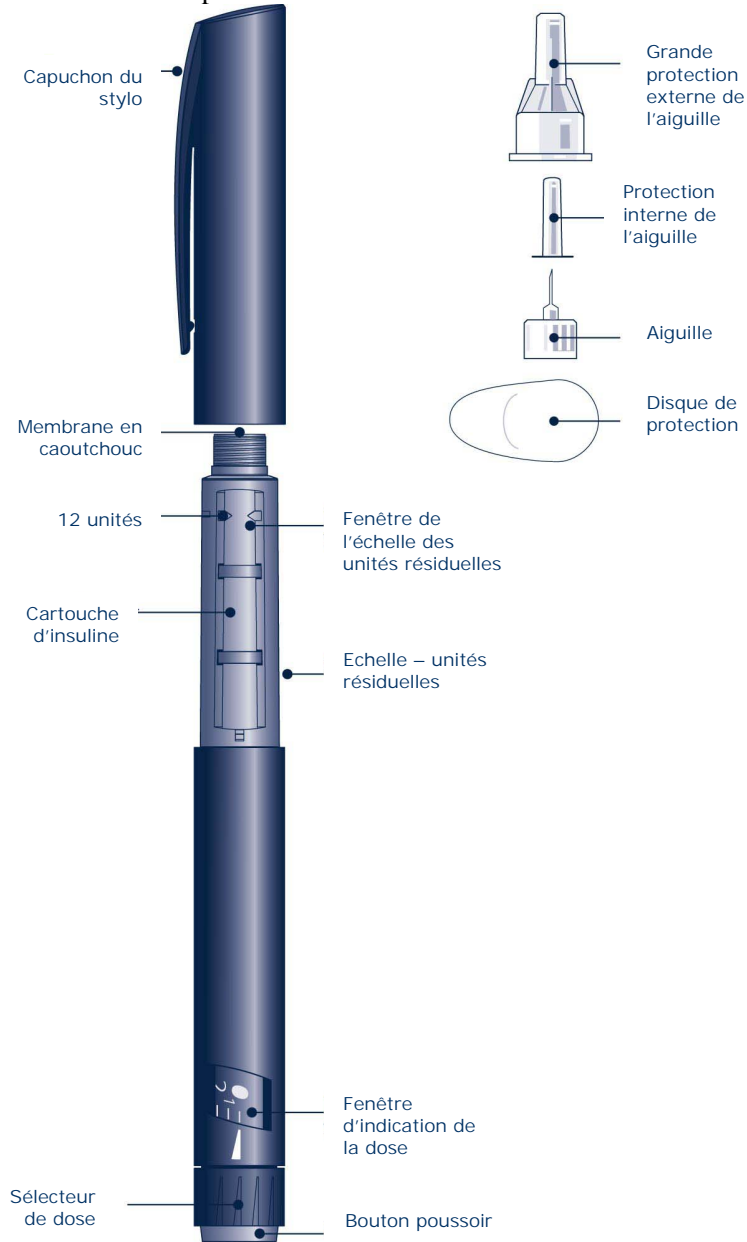


Pour commencer

Retirez le capuchon du stylo.

Avant chaque injection :

- **Désinfectez la membrane en caoutchouc à l'alcool**
- **Retirez le disque de protection** d'une aiguille NovoFine® S
- **Vissez directement et solidement l'aiguille** sur votre FlexPen® (figure A).
Utilisez toujours, à chaque injection, une nouvelle aiguille NovoFine® S jetable. Ne pliez pas l'aiguille et ne l'abîmez pas avant utilisation
- **Retirez la grande protection externe et la protection interne de l'aiguille** (figure B).
Conservez la grande protection externe.

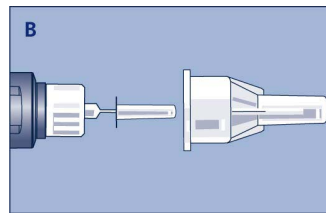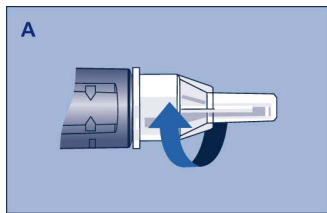



Purge pour éliminer l'air avant chaque injection

Dans des conditions normales d'utilisation, une petite quantité d'air peut s'accumuler dans l'aiguille et la cartouche.

Pour éviter toute injection d'air et garantir un dosage correct :

- **sélectionnez 2 unités** (figure C)
- **maintenez FlexPen® en position verticale, aiguille pointée vers le haut, et tapotez doucement la cartouche avec votre doigt** pour faire remonter les bulles d'air vers le haut de la cartouche (figure D)
- **aiguille toujours pointée vers le haut, appuyez à fond sur le bouton-poussoir**. Le sélecteur de dose revient à zéro
- **une goutte d'insuline doit apparaître au bout de l'aiguille**. Dans le cas contraire, changez d'aiguille et répétez l'opération au maximum 6 fois.

Si aucune goutte d'insuline n'apparaît, le stylo est défectueux et ne doit pas être utilisé.

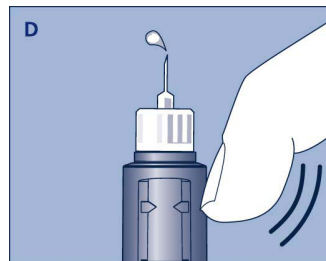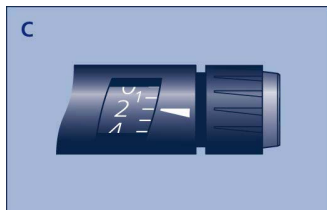

Sélection de la dose


- **Vérifiez que le sélecteur de dose est en position zéro**

- **Sélectionnez le nombre d'unités nécessaires pour votre injection** (figure E).

Vous pouvez augmenter ou réduire la dose en faisant tourner le sélecteur de dose dans le sens correspondant. Si vous réduisez le nombre d'unités, prenez garde à ne pas enfoncer le bouton-poussoir car de l'insuline s'échapperait alors du stylo.


N'utilisez pas l'échelle d'unités résiduelles pour mesurer votre dose d'insuline.

Il n'est pas possible de sélectionner une dose supérieure au nombre d'unités restant dans la cartouche.

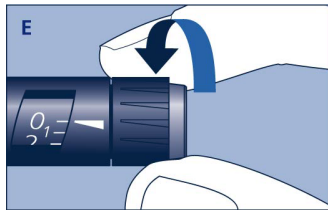

Injection de l'insuline

- **Insérez l'aiguille dans votre peau** (figure F). Respectez la méthode d'injection indiquée par votre médecin
- **Pour injecter la dose, appuyez à fond sur le bouton-poussoir** (figure G). Prenez garde à n'appuyer sur le bouton-poussoir qu'au moment de l'injection
- **Gardez le bouton-poussoir totalement enfoncé après l'injection jusqu'au retrait de l'aiguille.** L'aiguille doit demeurer sous la peau au moins 6 secondes afin de garantir l'injection de la totalité de la dose.

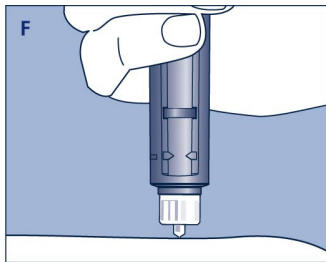

Retrait de l'aiguille


- **Remplacez la grande protection externe et dévissez l'aiguille** (figure H). **Jetez l'aiguille en respectant les précautions d'usage.**

Utilisez une aiguille neuve pour chaque injection.

Retirez l'aiguille après chaque injection, pour éviter que les variations de température ne causent des fuites de liquide.

Les professionnels de santé, les membres de votre famille ou toute autre personne s'occupant de vous doivent respecter les précautions d'usage lorsqu'ils manipulent et jettent les aiguilles usagées, afin d'éviter tout risque de piqûre accidentelle.

Votre FlexPen[®] usagé doit être jeté en respectant les précautions d'usage et après avoir dévissé l'aiguille.

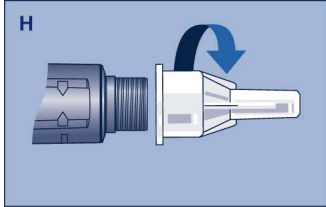

Entretien

Votre FlexPen[®] est conçu pour fonctionner avec une grande précision et en toute sécurité. Manipulez-le avec soin. S'il tombe ou s'il est endommagé ou écrasé, il existe un risque de fuite de l'insuline.

Par mesure de précaution, vous devez toujours avoir un dispositif de rechange au cas où vous perdriez ou endommageriez votre FlexPen[®].

Ne remplissez pas FlexPen[®].

Vous pouvez nettoyer l'extérieur de votre FlexPen[®] à l'aide d'un coton imbibé d'alcool. Ne le trempez jamais directement dans l'alcool, ne le lavez pas et ne le graissez pas. Vous risqueriez d'endommager le mécanisme.